

I Informazioni per l'uso


SANOHRA fly per adulti

SANOHRA fly per bambini da un anno e adulti con condotto uditivo di dimensioni ridotte.

SANOHRA fly protegge l'orecchio da repentine variazioni della pressione atmosferica, che ad esempio si verificano quando si viaggia in aereo.

Da cosa dipende il mal d'orecchi quando si vola?

L'orecchio è un organo di senso molto sensibile. Dietro alla membrana del timpano che separa ermeticamente si trova l'orecchio interno. L'aerazione dell'orecchio interno avviene per mezzo della tromba di Eustachio. Nella fase di decollo la pressione in cabina scende rapidamente. Questo calo di pressione normalmente non crea problemi all'orecchio, in quanto la tromba di Eustachio deve scaricare solo passivamente una pressione relativa nell'orecchio medio. Durante l'atterraggio la pressione atmosferica arriva nel giro di pochi secondi al livello del suolo. Se la tromba di Eustachio non riesce a creare abbastanza in fretta l'apertura attiva a questo punto necessaria, nell'orecchio si viene a creare una sotto pressione relativa talmente alta, da causare una convessità del timpano. Ciò provoca mal d'orecchi, che però anche manifestarsi anche sotto forma di dolore al viso o mal di denti. Con **SANOHRA fly** grazie all'Air Pressure Control le variazioni di pressione vengono rallentate dalla membrana del timpano. **SANOHRA fly** aiuta l'orecchio, anche con funzionalità limitata della Tromba di Eustachio, ad adattarsi in modo indolore a forti mutamenti di pressione.

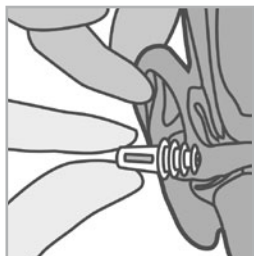

Come applicare SANOHRA fly

Far passare un braccio sopra la testa e sollevare leggermente la parte superiore del padiglione auricolare dell'orecchio sull'altro lato della testa. In questo modo il condotto uditivo si allarga. Prendere **SANOHRA fly** per il fusto, tenendolo tra il pollice e l'indice dell'altra mano e inserirlo, con le lamelle in avanti, nel condotto uditivo con delle leggere rotazioni. Procedere allo stesso modo per l'altro orecchio.

I bambini possono usare la protezione uditiva solo sotto la guida di un adulto. Non applicare in caso di infiammazione all'orecchio.

Quando applicare SANOHRA fly?

Al decollo. Chi ha problemi di mal d'orecchi già in fase di decollo, dovrebbe inserire **SANOHRA fly** prima che l'aereo si sollevi. Dopo 30 minuti si può togliere, in quanto le condizioni di pressione, quando l'aereo ha raggiunto l'altezza di volo, restano costanti. In caso di brevi tratte inferiori alle 2 ore di durata è consigliabile tenere **SANOHRA fly** per tutta la durata del volo.

All'atterraggio. Applicare **SANOHRA fly** al massimo entro 45 minuti prima dell'atterraggio, come descritto. Non aspettare che i piloti annuncino la fase di atterraggio. Si raccomanda di supportare la funzione della tromba di Eustachio masticando, deglutendo e sbadigliando. La protezione dell'orecchio è ottimale, se **SANOHRA fly** viene tolto solo dopo aver raggiunto gli edifici dell'aeroporto.

Tenete presente che **SANOHRA fly** per i suoi principi porta anche ad un isolamento acustico.

Come togliere SANOHRA fly

Prima di estrarlo sollevare leggermente il padiglione auricolare come per l'operazione d'inserimento. Non togliere la protezione auricolare con movimenti bruschi, ma lentamente con delle leggere rotazioni.

SANOHRA fly non deve essere assolutamente pulito con acqua o con detersivi. I minerali stessi contenuti nell'acqua ostruirebbero l'APC. Anche le impurità dell'aria ed il cerume possono essere causa d'ostruzione. Riporre sempre **SANOHRA fly** nella scatola dopo l'uso. Per garantire un funzionamento ottimale, usare **SANOHRA fly** al massimo per 3 voli di andata e ritorno.

Altri prodotti della Innosan GmbH:

SANOHRA swim protezione auricolare per il nuoto, durante il bagno e la doccia.

Protegge il canale uditivo e timpano dalle infiltrazioni d'acqua.

ProBrise® più aria da respirare

Dilatatore nasale che puntella e allarga leggermente le alette nasali. Per una respirazione migliore quando si fa sport e per combattere il russamento. www.probrise.de