

## Gebruiksaanwijzing


**Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** voor volwassenen

**Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** voor kinderen vanaf één jaar en volwassenen met kleine gehoorgangen.

**Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** beschermt het oor tegen snelle veranderingen in de luchtdruk, zoals dit bijv. tijdens het vliegen voorkomt.

### Hoe ontstaat oorpijn tijdens het vliegen?

Het oor is een uiterst gevoelig zintuig. Achter het luchtdicht afsluitende trommelvlies ligt het middenoor. De ventilatie van het middenoor geschiedt door de buis van Eustachius. Tijdens de start neemt de cabinedruk snel af. Deze drukval veroorzaakt doorgaans geen problemen voor het oor, omdat de buis van Eustachius een relatieve overdruk in het middenoor alleen passief moet afdrukken. Tijdens de landing stijgt de luchtdruk binnen enkele minuten naar grondniveau. Als de buis van Eustachius de nu vereiste actieve opening niet snel genoeg tot stand kan brengen, ontstaat in het middenoor zo een hoge, relatieve onderdruk, dat een welving van het trommelvlies wordt veroorzaakt. Dit leidt tot oorpijn, maar kan zich ook manifesteren als gezichts- of kiespijn. Door het gebruik van de Air Pressure Control (APC-) filter van **Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** worden luchtdrukveranderingen voor het trommelvlies vertraagd. **Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** ondersteunt het oor, ook bij een verminderde werking van de buis van Eustachius, om zich pijnloos aan te passen aan sterk wisselende drukveranderingen.

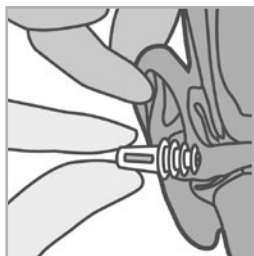

### Hoe Oordop Vliegtuig SANOHRA fly in te brengen ?

Doe de arm over het hoofd en til de oorschelp aan de andere kant van het hoofd iets omhoog. Dit zal de gehoorgang verruimen. Pak het uiteinde van **Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** met duim en wijsvinger van de andere hand vast en breng deze, met de lamellen vooraan, met licht draaiende bewegingen in de gehoorgang in. Bij het andere oor precies zo te werk gaan.

*Kinderen mogen de oorbescherming alleen onder leiding van volwassenen gebruiken. Bij ooraandoeningen vooraf gebruik eerst uw (huis-)arts raadplegen.*

### Wanneer moet Oordop Vliegtuig SANOHRA fly worden gebruikt?

**Bij de start:** Wie bij de start al last van oorpijn heeft, kan **Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** het beste gebruiken voordat het vliegtuig opstijgt. Na 30 minuten kan **Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** er weer uitgehaald worden, omdat de drukverhoudingen doorgaans constant zijn, wanneer het vliegtuig de vlieghoogte heeft bereikt. Tijdens korte vluchten van minder dan 2 uur is het aanbevolen om **Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** gedurende de gehele vlucht te dragen.

**Bij de landing:** Gebruik **Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** zoals beschreven uiterlijk 45 minuten voordat de landing inzet. Wacht niet af totdat de landing door de piloot wordt aangekondigd. Het wordt aanbevolen om de werking van de buis van Eustachius nog te versterken door middel van kauwen, slikken of geeuwen. Het oor wordt optimaal beschermd, wanneer **Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** pas na de aankomst op de luchthaven eruit wordt gehaald. Dus buiten het vliegtuig, aangekomen in het airportgebouw.

Houd er rekening mee, dat **Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** vanwege zijn functie ook leidt tot geluidvermindering (terwijl u toch alles blijft horen!).

### Uithalen van Oordop Vliegtuig SANOHRA fly

Til de oorschelp voor het uithalen, net als bij het indoen, licht op. Haal de oorbescherming er niet abrupt uit, maar verwijder deze met licht draaiende bewegingen.

**Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** kan niet worden schoongemaakt met water of schoonmaakmiddelen. Alleen al de mineralen die in het water zitten, kunnen de APC-filter verstopen. Ook luchtverontreiniging en oorsmeer kunnen verstopping veroorzaken. **Belangrijk:** **Oordop Vliegtuig SANOHRA fly** zijn meerdere malen te gebruiken. Berg ze na gebruik op in het handige bewaardoosje. Het APC-filter kan verstopt raken door luchtvervuiling, stuifmeel, stof of vocht. Dit kan de werking verminderen.

### Overige producten:

**Oordop Water SANOHRA swim** (watertegenhoudend, geluiddoorlatend)

### Voor nadere informatie en overige oordopjes:

[www.oordopvliegtuig.nl](http://www.oordopvliegtuig.nl), [www.oordopwater.nl](http://www.oordopwater.nl), [www.oordopgeluid.nl](http://www.oordopgeluid.nl)